



**To Breathe Well
is to Live Well**

GEBRUIKSAANWIJZING

MRA - Mondstuk tegen snurken

IFU - MRA - Mondstuk tegen

Lees de instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt!

1. Informatie

Productnaam: Anti Snurk Neusspreider
Basic-UDI: 697686490ASNV0017E

Fabrikant: Henan Geesion Medical
Devices Co., Ltd

Adres: No.2009-046, 2e Verdieping,
Science and Technology Building,
No.73-10 Wenhua Road,
Dongfeng Road, Jinshui District,
Zhengzhou

SRN: CN-MF-000038427

EC-REP: SUNGO Europe B.V.,
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Nederland

Importeur: Servifarmacomp
Nederland B.V., Klompenmakerstraat
135, 3194DD Hoogvliet, Nederland

2. Productdetails

Bevat:

- 1x Mondstuk
- 1x Stofvrije opbergdoos
- 1x Spatel



Doel:

Opent de luchtwegen, verbetert de ademhaling, verlicht bruxisme en snurken.
Alleen voor persoonlijk hergebruik, niet-steriel geleverd.

Indicaties:

Geschikt voor snurken, ademhalingsproblemen en slaapstoornissen.

Contra-indicaties:

Niet gebruiken bij:

1. Slaapapneu
2. Ernstige ademhalingsziekten
3. Losse tanden of ernstige parodontale aandoeningen
4. Recent geplaatste kunstgebitten of implantaten (binnen een jaar)
5. Onder 18 jaar
6. Kaakproblemen

Doelgroep:

Patiënten vanaf 18 jaar met genoemde klachten.

Gebruiker:

De patiënt zelf.

Werking:

Het mondstuk duwt de kaak naar voren voor een betere luchtweg. Tot 8 uur bruikbaar, met een levensduur van 4 maanden.

Klinische voordelen:

1. Vermindert snurken
2. Comfortabele beetopening en verlichting van kaakgewricht
3. Controleert de tongpositie

Claims:

Bevordert neusademhaling in plaats van mondademhaling.

3. Bijwerkingen & Waarschuwingen

Mogelijke bijwerkingen:

- Tandverplaatsing of beetveranderingen
- Pijn aan tandvlees of tanden
- Kaakgewrichtspijn
- Belemmering van ademhaling door de mond
- Overmatige speekselproductie


Raadpleeg een arts als de klachten niet verbeteren.

▲ Let op: Niet bedoeld als gebitsbeschermer bij sport. Biedt geen bescherming tegen stoten.


4. Toepassing

4.1 Gebruiksaanwijzing


1. Plaats het blauwe handvat in het ademgat van het mondstuk.

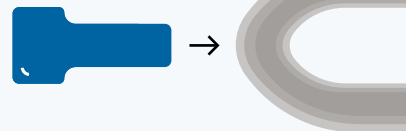


2. Giet gekookt water in een beker en laat het afkoelen tot 80°C (ca. 15-20 seconden).

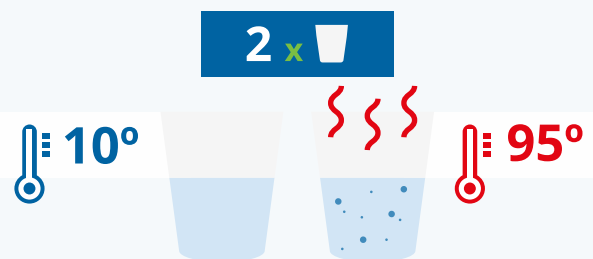


3. Dompel het mondstuk (met handvat) in het warme water.

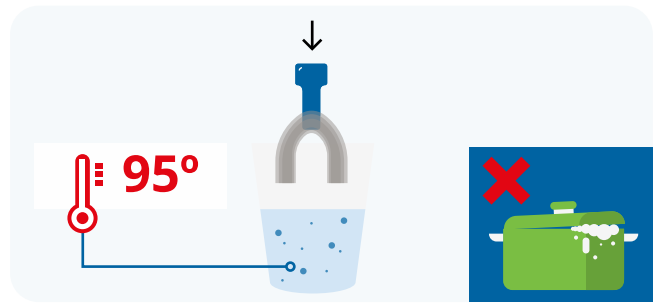


4. Laat het mondstuk 30 in het water liggen.

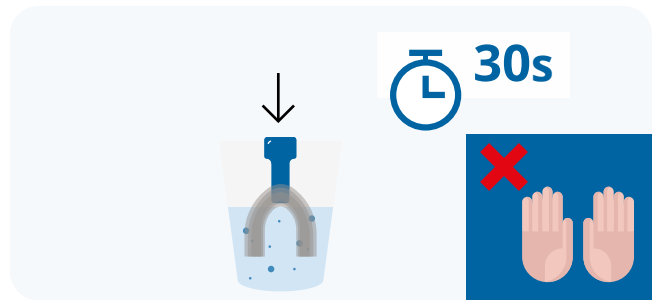


5. Schud overtollig water af, laat 15 seconden afkoelen en plaats in de mond.

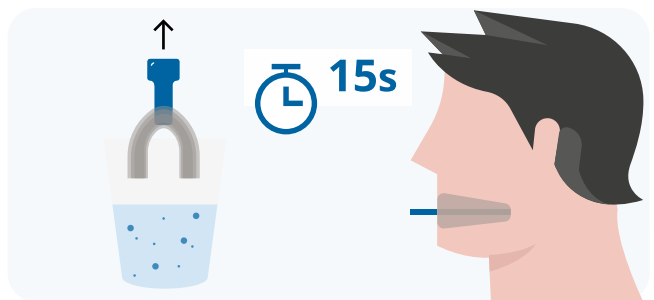


6. Vorm het mondstuk met lippen, wangen, vingers en tong naar uw gebit.

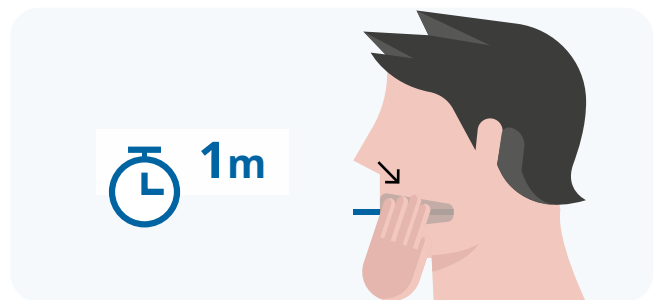

7. Dompel vervolgens het gevormde mondstuk 2 minuten in koud water.

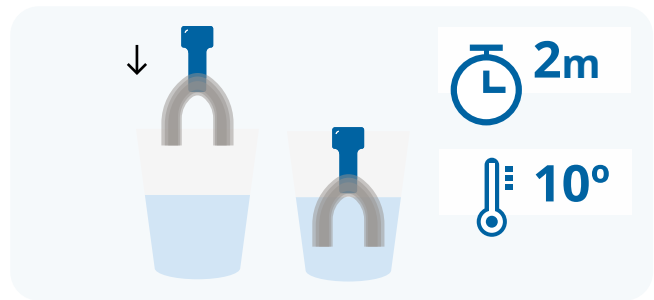

8. Verwijder voorzichtig het blauwe handvat.

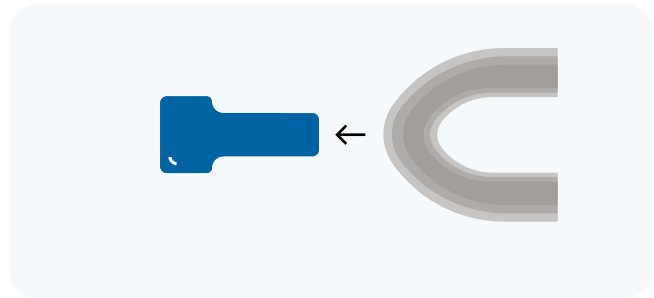

9. Het mondstuk moet nu prettig zitten.

10. Herhaal de aanpassing indien nodig.

4.2. Reiniging en opslag:

Spoel het mondstuk af met koud of lauwwarm water. Bewaar in de opbergdoos.

Bewaar op een droge, koele plaats, uit de buurt van hitte, licht en vocht. Reinig vóór elk gebruik.

5. Melding aan de autoriteiten

Bij ernstige incidenten, meld dit aan de fabrikant en bevoegde autoriteiten.

6. Symbolen

De gebruikte symbolen voldoen aan de norm EN ISO 15223-1.

Doc #: <IFU-MOUTH-GUARD>

Date of publication: <08.05.2025>

Revision number: <01/2025>

