



**To Breathe Well
is to Live Well**

GEBRUIKSAANWIJZING

Neusspreiders

IFU - Neusspreiders

Lees de instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt!

1. Informatie

Productnaam: Anti Snurk Neusspreider
Basic-UDI: 697686490ASNV0017E

Fabrikant: Henan Geesion Medical
Devices Co., Ltd

Adres: No.2009-046, 2e Verdieping,
Science and Technology Building,
No.73-10 Wenhua Road,
Dongfeng Road, Jinshui District,
Zhengzhou

SRN: CN-MF-000038427

EC-REP: SUNGO Europe B.V.,
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Nederland

Importeur: Servifarmacomp
Nederland B.V., Klompenmakerstraat
135, 3194DD Hoogvliet, Nederland

2. Productdetails



Doel:

De **Anti Snurk Neusspreider** is een buisvormig hulpmiddel dat helpt bij ademhalingsproblemen tijdens de slaap. Het opent de neusholte voor betere luchtstroom en vermindert obstructies.

Niet-steriel geleverd.

Indicaties:

- Verstopte of instortende neusgaten
- Neusgerelateerd snurken
- Vermoeid wakker worden ondanks volledige nachtrust

Doelgroep:

Volwassenen (18+) met ademhalingsproblemen en snurken.

Gebruiker:

De patiënt zelf.

Werking:

Opent de neusholtes voor verbeterde ademhaling tijdens de slaap.

Klinische voordelen:

- Minder snurken
- Betere zuurstofopname


Claims:

- Voorkomt snurken
- Vermindert neusademhalingsproblemen
- Beter ademen bij verkoudheid of allergie
- Diepere slaap
- Meer uitgerust wakker worden
- Je voelt je fitter

3. Waarschuwingen / voorzorgsmaatregelen:

Kleine onderdelen, verstikkingsgevaar, niet geschikt voor jonge kinderen.
Raadpleeg een arts als er geen verbetering optreedt.

4. Gebruiksaanwijzing

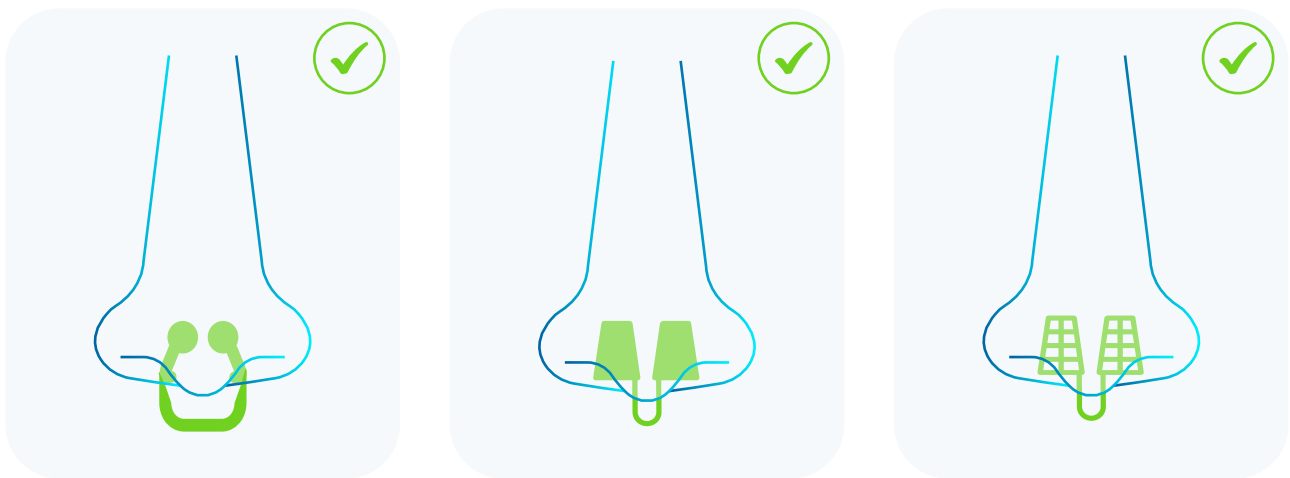

Describe:

1. Past in elke vorm van neusgaten
2. Plaats de ronde uiteinden naar boven gericht in de neus
3. Zorgt voor zachte spreiding van de neusgaten voor stillere ademhaling
4. Gewenningsperiode: 3 tot 7 dagen
5. Reinig na elk gebruik en laat drogen

Bewaar op een droge, koele, geventileerde plek, uit de buurt van hitte, licht en vocht.
Voor gebruik kan het product tot 3 jaar worden opgeslagen.
Afvalverwerking afhankelijk van vervuiling en volgens lokale wetgeving.

5. Melding aan de autoriteiten

Bij ernstige incidenten, meld dit aan de fabrikant en bevoegde autoriteiten.

6. Symbolen

De gebruikte symbolen voldoen aan de norm EN ISO 15223-1.

Doc #: <IFU-ASNV0017E>

Date of publication: <08.05.2025>

Revision number: <01/2025>