



**To Breathe Well
is To Live Well**

GEBRUIKSAANWIJZING

Neusstrips - Anti Snurk Pleisters

IFU - Neusstrips - Anti Snurk Pleisters

! Carefully read the instructions for use before using the products!

1. Informatie

Productnaam: Anti Snurk
Neusspreider
Basic-UDI: 697686490ASNV0017E

Fabrikant: Henan Geesion Medical
Devices Co., Ltd
Adres: No.2009-046, 2e Verdieping,
Science and Technology Building,
No.73-10 Wenhua Road,
Dongfeng Road, Jinshui District,
Zhengzhou
SRN: CN-MF-000038427

EC-REP: SUNGO Europe B.V.,
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Nederland


Importeur: Servifarmacomp
Nederland B.V., Klompenmakerstraat
135, 3194DD Hoogvliet, Nederland

2. Productdetails

Gebruik **Dr. Breathe Well™** voor:

- Snurken
- Allergieën
- Verkoudheid

De neusstrips zijn gemaakt van PE
en niet geweven.
Bevat geen BPA.

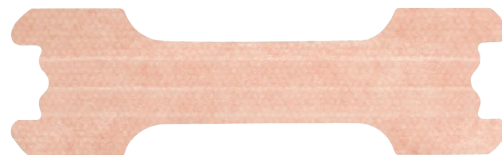


Beschikbare aantallen per verpakking:

- 30 stuks
- 90 stuks
- 365 stuks

Beschikbare maten:

- 66mm (medium/large): geschikt voor de meeste neuzen
- 43mm (small): geschikt voor kleine neuzen

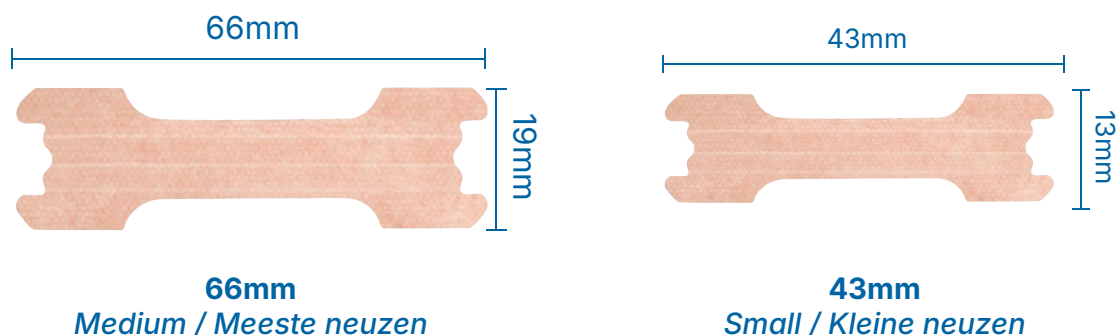

Doel:

De neusstrip helpt bij het verbeteren van de luchtstroom door het openen van de neuspassage, wat snurken vermindert en de ademhaling vergemakkelijkt. Niet-steriel geleverd. Voor eenmalig gebruik. De neusstrip kan tot 8 uur lang worden gedragen.

Indicaties:

Moeite met ademen door de neus, neusverstopping, snurken gerelateerd aan neusobstructie.

Contraïndicaties:

Alle patiënten die last hebben van een verstopte neus, 5 jaar en ouder.

Doelgroep:

5 jaar en ouder met ademhalingsproblemen en snurken.

Gebruiker:

De patiënt zelf.

Werking:

De strip tilt zachtjes de neusvleugels op, opent de luchtwegen en vergemakkelijkt de ademhaling.

Klinische voordelen:

- Minder snurken
- Betere ademhaling tijdens slaap of sport
- Meer uitgerust wakker worden

Claims:

- De neusstrips voorkomen of verminderen snurken
- Minder last van neusademhalingsproblemen
- Beter ademen bij verkoudheid of allergie
- Je slaapt beter en dieper
- Je wordt uitgeruster wakker
- Je voelt je fitter

3. Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

1. Voor maximale resultaten, plaats de strip correct.
2. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet langer dan 8 uur gebruiken.
3. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.
4. Niet gebruiken op wondjes, een verbrande of geïrriteerde huid.
5. Stop het gebruik als er huiduitslag of huidirritatie optreedt.
6. Raadpleeg uw arts als u symptomen van slaapapneu heeft.
7. Dit product is voor uitwendig gebruik, niet inslikken. Kinderen moeten het product onder toezicht van een volwassene gebruiken.

Als uw medische toestand niet verbetert door het gebruik van dit product, raadpleeg dan altijd een arts.


4. Gebruiksaanwijzing

Opslag:

Bewaren op een koele, droge plaats. Vermijd direct zonlicht, vocht en hittebronnen.


Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

Instructions for use:

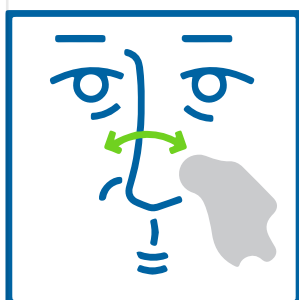


Step 1:

Reinig en droog de neus goed voor gebruik.

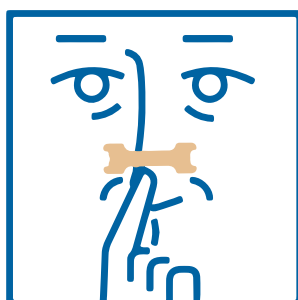


Step 2:

Verwijder de bescherm laag van de strip en plak op de **juiste hoogte*

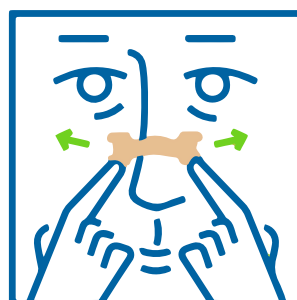

Step 3:


Plaats de strip op de neusbrug, net boven de neusvleugels.

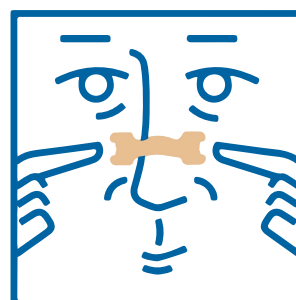

Step 4:

Druk zachtjes aan om de strip goed te laten hechten. Laat nu voorzichtig de uiteinden los.

**juiste hoogte*

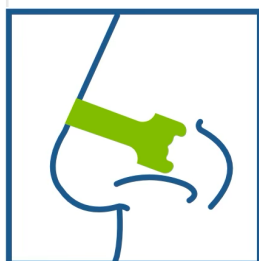

Te laag



Te hoog



Correcte hoogte ✓

Afvalverwerking:

Deze kunnen door de gebruiker worden afgevoerd via het reguliere afval.

5. Melding aan de autoriteiten

Als er een ernstig incident optreedt, meld dit aan de fabrikant en aan de bevoegde medische autoriteit.

6. Verklaring van symbolen:

De symbolen op de verpakking zijn conform EN ISO 15223-1.

Doc #: <IFU-MDR-NASAL-STRIPS>

Date of publication: <08.05.2025>

Revision number: <01/2025>

